

Lieu, Date  
Schlieren, Septembre 2023

Contact  
Customer Support

Téléphone central  
+41 56 418 45 45

Courriel  
[swiss@mikrona.com](mailto:swiss@mikrona.com)

## **Arrêt de production de Dürr Dental Sepamatic (320.7052.01) - ORTHORA 200 avec aspiration à sec**

Chère/cher revendeur spécialisé(e)

Par la présente, nous vous informons de l'arrêt de production de la Sepamatic avec rinçage (320.7052.01), qui est montée dans le système d'aspiration à sec de l'ORTHORA 200 :

A partir de fin octobre 2023, cette pièce de rechange ne sera plus disponible, car elle a été annulée par Dürr Dental et sera remplacée par le CS1 Combi Sepamatic 1. Selon l'âge de l'ORTHORA 200, la transformation en un nouveau système d'aspiration à sec peut être simple ou nécessiter des travaux supplémentaires. Selon le numéro de fabrication du fauteuil ORTHORA 200, les règles suivantes s'appliquent à la modification en CS1 :

- A partir de **OT1.03000** (à partir du 19.03.2013), la CS1 peut être installée sans autre modification de l'alimentation électrique (E-12).
- \*A partir de **OT1.02100** (à partir du 28.01.2010) jusqu'à **OT1.02999**, il est nécessaire de modifier l'alimentation électrique (E-12) pour pouvoir utiliser la CS1.
- \*A partir de **OT1.00100** (à partir du 17.07.2001) jusqu'à **OT1.02099**, une modification n'est pas possible, car la CS1 ne peut pas être installée en raison de l'espace limité.

\*Pour les unités de traitement de ces séries, nous recommandons de stocker la Sepamatic existante (320.7052.01) à des fins de remplacement, car le passage à la CS1 est coûteux (modification de l'alimentation électrique plus installation de la CS1) ou impossible en raison de l'espace limité disponible. En outre, si la Sepamatic est en mauvais état, il est possible qu'aucune possibilité de réparation ne soit proposée. C'est pourquoi nous vous prions de respecter la date limite de commande ci-dessous pour le stockage :

**Les dernières commandes pour la Sepamatic sont acceptées jusqu'au 29.09.2023.**

À partir de fin 2023, les nouvelles unités de traitement ORTHORA 200 avec aspiration à sec seront livrées en standard avec le CS1 Combi Sepamatic 1.

Si vous avez des questions ou des doutes, notre Customer Support ainsi que la gestion technique des produits se tiennent à votre disposition !

Avec nos meilleures salutations

MIKRONA GROUP AG